


CRYOSKIN

ULTRA LIPO

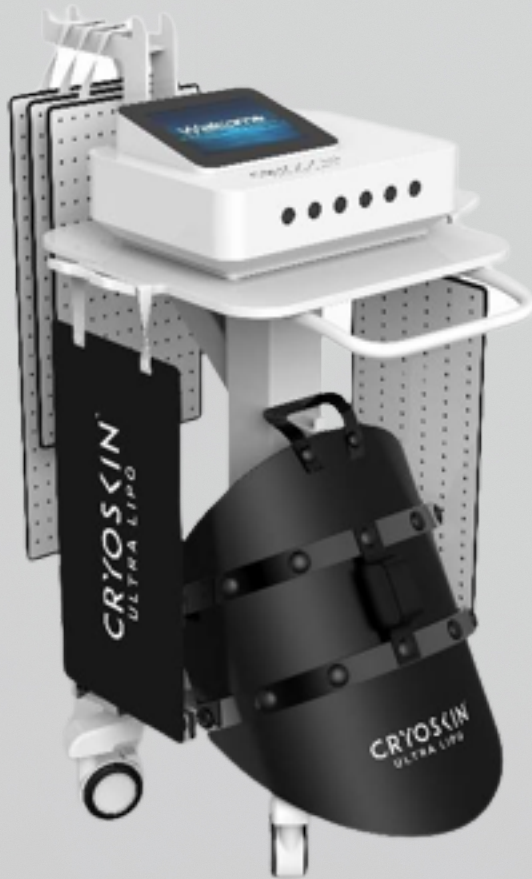

your
wellness
& beauty
partner


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CRYOSKIN ULTRA LIPO?

Το CRYOSKIN ULTRA LIPO χρησιμοποιεί **LLT Dual Wavelength** προσφέροντας έτσι θεραπείες που στοχεύουν στο λίπος και στην κυτταρίτιδα.

Τι είναι το LLT(Led Light Therapy?)

Η τεχνική LLT διαχέει ένα μήκος κύματος που φτάνει υποδερμικά και καταστρέφει εναποθέσεις λίπους και μειώνει τη όψη του φλοιού πορτοκαλιού. Αυτή η διαδικασία υγροποιεί το περιεχόμενο των λιποκυττάρων.

Το LLT εκπέμπει χαμηλά επίπεδα ενέργειας και δημιουργεί ένα χημικό σήμα στα λιποκύτταρα διασπώντας τα αποθηκευμένα τριγλυκερίδια.

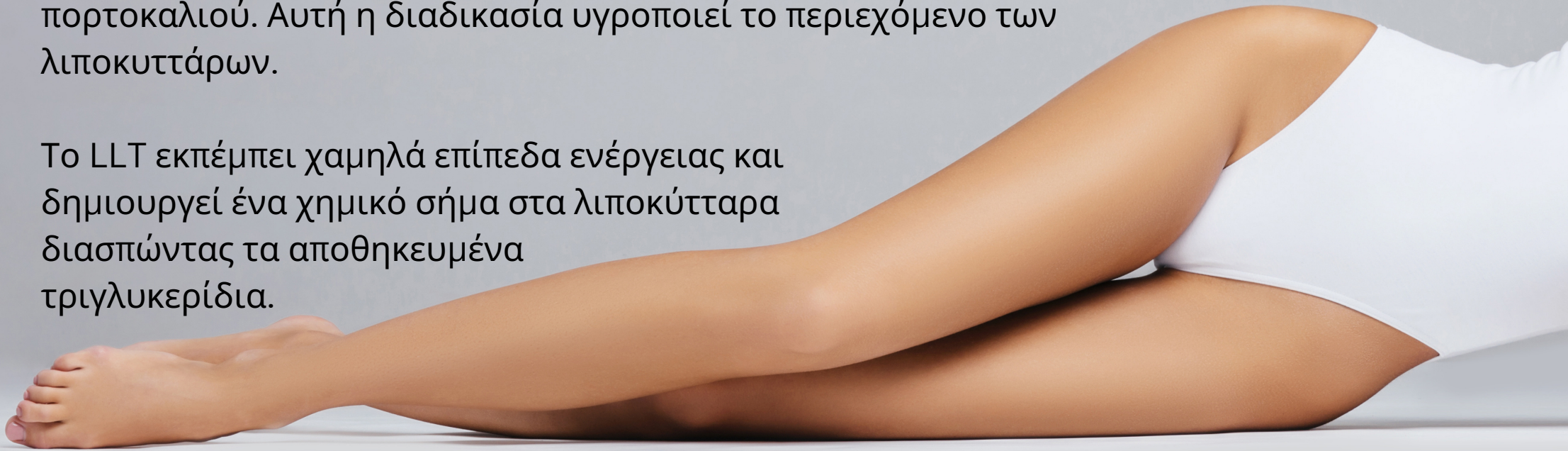

Τα τριγλυκερίδια διασπώνται σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη και δημιουργούνται κανάλια στις κυτταρικές μεμβράνες, όπου διευκολύνεται η απελευθέρωσή τους στο συνδετικό ιστό. Μετά χρησιμοποιούνται για να παράξουν ενέργεια μέσω του μεταβολισμού.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του LLD Dual Wavelegth?

Το Cryoskin Ultra Lipo διαθέτει Red light Leds που λειτουργούν και εκπέμπουν στο φάσμα των 635nm. Επίσης διαθέτει Near-infrared light Leds που λειτουργούν στα 940nm. Αυτός ο συγκεκριμένος συνδυασμός προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα και μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορα είδη λίπους.

635nm

Μειώνει το υποδόριο λίπος.
Βελτιώνει την ποιότητα
του δέρματος.

940nm

Αυξάνει την κυκλοφορία
του αίματος και χαλαρώνει
τους μύες. Μειώνει το
οίδημα και βελτιώνει τη
Λεμφική Αποστράγγιση.



Είναι το Cryoskin Ultra Lipo ασφαλές?


Τα λιπιδικά συστατικά (κυρίως λιπαρά οξέα και γλυκερόλη) προκύπτουν από τη διαδικασία υγροποίησης LLT είναι απολύτως φυσικά. **Καίγονται ως ενέργεια**, επομένως η επίπτωση στα νεφρά είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό μας επιτρέπει έως και δύο θεραπείες LLT ανά εβδομάδα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρξει σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του LLT ώστε να βοηθήσουμε στην καύση αυτών των λιπιδικών συστατικών, αν είναι δυνατόν 6 ώρες μετά τη θεραπεία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το μήκος κύματος LLT στοχεύει με ακρίβεια συγκεκριμένους τύπους κυττάρων για να ενεργοποιήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με χωρίς αλλοίωση των γύρω ιστών.

LED LIGHT THERAPY vs. LASER

Το LLT παράγει μια άνετη ζεστασιά γύρω στους +42°C. Η αίσθηση είναι πολύ ευχάριστη και δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Η δράση του LLT Dual Wave στους υποδόριους ιστούς είναι παρόμοια με τη δράση του λέιζερ, με λιγότερους κινδύνους και περισσότερη άνεση.

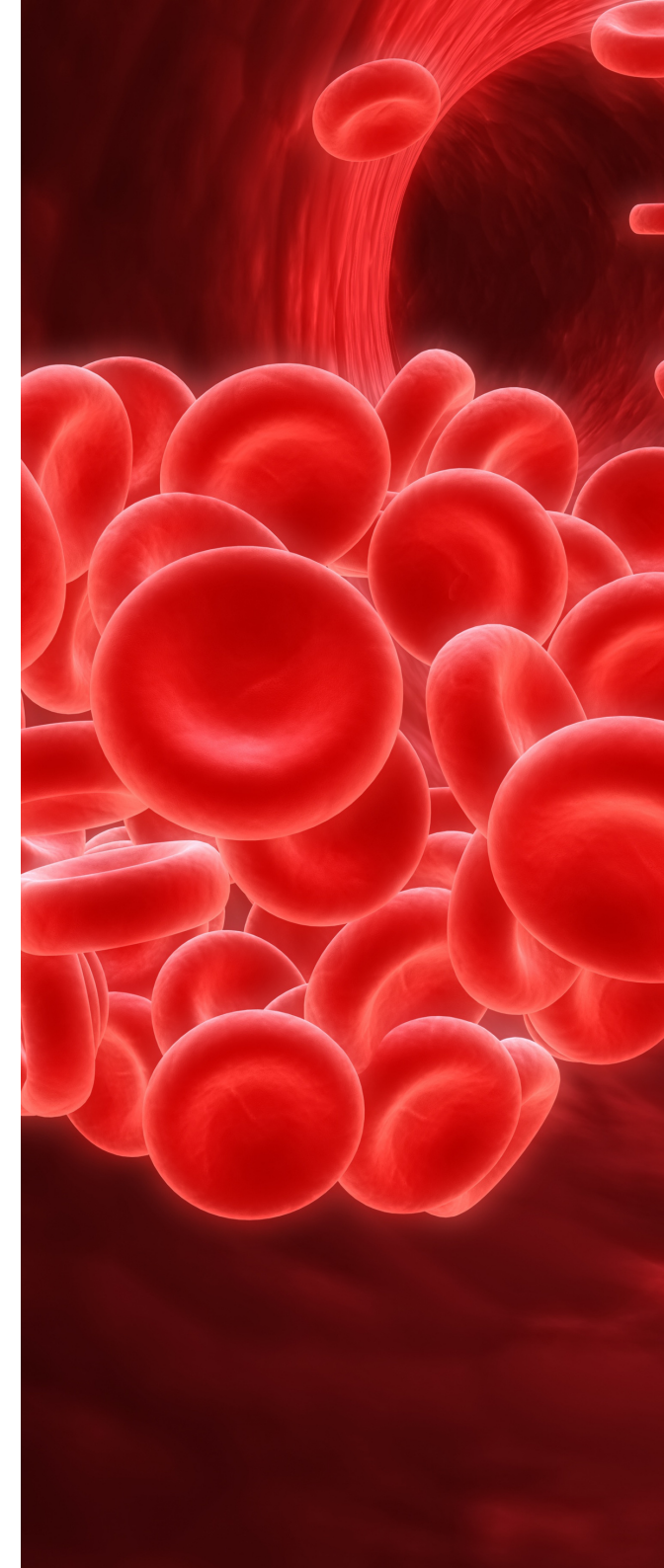

EXCLUSIVE LED WRAP BELTS

Οι ζώνες περιτυλίγματος Cryoskin Ultra Lipo κατασκευάζονται στη Γερμανία και έχουν σχεδιαστεί για τη μέγιστη διάχυση του φωτός στην επιδερμίδα.

Εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη ζώνης περιτυλίγματος με απίστευτη συγκέντρωση 1086 διόδων LED για έντονη δράση και πολύ γρήγορα αποτελέσματα.

**Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ULTRA LIPO LED ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΛΤ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- ✓ Μήκος κύματος: 635 nm, 940 nm
- ✓ Οθόνη αφής 8 ιντσών
- ✓ Γερμανικά τσιπ λέιζερ
- ✓ Δίοδος χαμηλής έντασης LLT
- ✓ Κάθε λάμπα Ενέργειας 200MW
- ✓ 1086 τμχ με ζώνη περιτυλίγματος 5 τμχ (1 μεγάλο, 2 μεσαίο, 2 μικρό)
- ✓ 534 επιπλέον LED στην επιλογή Face Dome
- ✓ Συνεχής και παλμική λειτουργία
- ✓ Αερόψυκτο σύστημα ψύξης
- ✓ Τάση: 100-130V / 200-230V / 50-60Hz
- ✓ Τάξη II, Τύπος B
- ✓ Συνθήκες περιβάλλοντος: 10 έως 40°C, υγρασία κάτω από 75% RH
- ✓ Διαστάσεις μονάδας: 40 x 40 x 30 cm
- ✓ Διαστάσεις καροτσιού: 66 x 62 x 42 cm
- ✓ Βάρος: μονάδα 6 κιλά, ιμάντες καροτσιού και περιτύλιξης: 9 κιλά

